

Corega Tabs Bio Formula*136szt.Del(DE)IR



Cena: 33,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	136 tabl.
Postać	tabl.rozpusz.
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Substancja czynna	-

Opis produktu

Corega Tabs Bio Formula tabletki do czyszczenia protez zębowych 136 tabletek

Tabletki do czyszczenia protez zębowych **Corega** zapewniają szybkie, niezrównane czyszczenie twojej protezie zębowej dzięki formule, która uwalnia 2x więcej składników czyszczących.

Tabletki Corega Tabs Bio Formula działają przeciwbakteryjnie i pomagają zapobiegać gromadzeniu się płytki bakteryjnej i kamienia oraz związanym z nimi podrażnieniom dziąseł.

System czyszczący 4w1 zawiera 4 aktywne składniki, które działając wspólnie utrzymują protezę w czystości.

Skład:

Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, Sodium Carbonate peroxide, TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfoacetate, VP/VA Copolymer, Aroma, Subtilisin, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015.

Stosowanie:

1 tabletkę wrzucić do naczynia z ciepłą, ale nie gorącą wodą.

Użyj takiej ilości wody aby proteza została całkowicie zanurzona. Jeśli masz 2 protezy /protezę dolną i górną/, zanurz obie w tym samym roztworze.

Protezę/y/ pozostaw w mieszaninie czyszczącej na 15 minut. Po tym czasie wyjmij protezę/y/ i przy pomocy miękkiej szczoteczki i roztworu wyczyść ją.

Następnie opłucz dokładnie protezę pod bieżącą wodą i wylej pozostały roztwór.

Raz sporządzony roztwór służy tylko do jednokrotnego wyczyszczenia protezy lub protez.