

# Opatr.paraf. BACTIGRAS z chlorhexyd. 15x20

Cena: 110,61 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 szt.
Postać	-
Producent	SMITH & NEPHEW
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Opatrunek parafinowy BACTIGRAS z chlorhexydyną.

Bactigras spełnia rolę bariery pomiędzy raną a opatrunkiem dodatkowym, umożliwiającym odpływ wydzieliny do wchłaniającego ją opatrunku zewnętrznego. Antyseptyk, octan chlorheksydyny uwalniany stopniowo z opatrunku wywiera długotrwałe działanie przeciwbakteryjne przeciwko pałeczkom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym. Do ran na które można stosować Bactigras zaliczamy niewielkie oparzenia, skaleczenia, otarcia i niewielkie ubytki skóry, rany dawców i biorców skóry, owrzodzenia podudzi.

#### Skład:

parafina, chloroheksydyna

#### Stosowanie:

Oczyszczyć i przygotować ranę zgodnie ze standardami postępowania. Wybrać odpowiedni opatrunek lub otworzyć opakowanie w miejscu nacięcia. Używając pęsety i rękawiczek usunąć papier ochronny w przypadku rolki. Pokryć powierzchnię rany pojedynczą warstwą opatrunku. Zastosować dodatkowy opatrunek absorbcyjny, mocując go przylepcem lub bandażem. Usunięcie opatrunku. Bactigras może zostać na ranie w trakcie zmiany opatrunku chłonnego. Częstość zmiany opatrunku zależy od stanu klinicznego; od raz na dobę do dwóch razy na tydzień. Jeżeli opatrunek przywiera do rany można go zwilżyć fizjologicznym roztworem soli kuchennej i delikatnie usunąć z rany.

#### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.