

## SUTRICON plast.silik.n/bliz.5\*30cm\*5szt

Cena: 128,93 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op. (5 szt.)
Postać	-
Producent	VERCO
Substancja czynna	-

## Opis produktu

SUTRICON plastry silikonowe na blizny to innowacyjne rozwiązanie w profilaktyce oraz leczeniu blizn o różnym pochodzeniu.

Plastry są wykonane z folii poliuretanowej oraz specjalnej warstwy żelu silikonowego - taki dobór składników zapewnia pełną biokompatybilność. Produkt skutecznie zmniejsza widoczność blizn, a także poprawia ich wygląd - w rezultacie blizny stają się jaśniejsze i wygładzone. Plastry świetnie eliminują ból, świąd i poczucie ściągnięcia skóry. Sutricon można stosować zarówno w profilaktyce blizn, w celu zmniejszenia ryzyka nieprawidłowego bliznowacenia rany oraz w leczeniu blizn pooperacyjnych (np. po cięciu cesarskim), pooparzeniowych, pourazowych i innych.

**Skład:**

folia poliuretanowa, warstwa żelu silikonowego oraz substancje pomocnicze

**Stosowanie:**

Najlepszy efekt uzyskuje się wymieniając plaster co 24 h. Możliwe jest stosowanie plastra przez maksimum 5 dni. Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem i osuszyć. W celu dopasowania wielkości plastra do powierzchni blizny, możliwe jest jego docięcie.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.