

SUTRICON silikonowy żel na blizny 15ml



Cena: 33,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 ml
Postać	-
Producent	VERCO
Substancja czynna	-

Opis produktu

Sutricon to żel na blizny wspomagający zmniejszenie, rozjaśnienie i wygładzenie blizn.

Zawiera wysokiej jakości silikon farmaceutyczny. Tuba z kaniulą zapewnia łatwość aplikacji, pozwalając na stosowanie produktu na nierówną, często poddawane napięciom powierzchnię skóry. Żel jest przezroczysty, bezwonny, hipoalergiczny. Szybko wysycha, tworząc na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę, która utrzymuje odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroni powierzchnię blizny przed czynnikami zewnętrznymi. Po zastosowaniu żelu skóra staje się matowa i jedwabiście gładka w dotyku. Regularne stosowanie żelu silikonowego na powierzchnię blizny wspomaga jej zmniejszenie, rozjaśnienie oraz wygładzenie. Dodatkowo pomaga w pielęgnacji blizn oraz zmniejsza ryzyko powstawania bliznowców i blizn przerostowych. Najlepsze efekty pielęgnacji uzyskuje się poprzez aplikację żelu połączoną z masażem blizny.

Skład:

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Silica

Stosowanie:

Stosowanie produktu Sutricon żel powinno się rozpocząć jak najszybciej po zagojeniu rany lub zdjęciu szwów. Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość preparatu. Kolistymi ruchami delikatnie masować powierzchnię blizny przez około 2-3 minuty. Rozcierać bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców. Zaleca się stosować preparat minimum 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.

