

Bionect Silverspray, aerozol, 50 ml



Cena: 36,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 ml
Postać	aer.
Producent	MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Substancja czynna	Acidum hyaluronicum

Opis produktu

BIONECT Silverspray jest pudrowym opatrunkiem w aerozolu do stosowania miejscowego, zawierającym sól sodową kwasu hialuronowego (HA) i srebro koloidalne.

Bionect Silverspray jest wskazany do doraźnego miejscowego leczenia niezakażonych uszkodzeń skóry (tj. otarć, zadrapań, pęknięć, rozcięć, drobnych ran pooperacyjnych, oparzeń pierwszego i drugiego stopnia) i do zapewnienia wilgotnego środowiska rany, chroniącego przed nadkażeniem bakteryjnym z zewnątrz.

Skład:
sól sodowa kwasu hialuronowego 0,2%, srebro koloidalne 2,0%, dwutlenek krzemu, lekki kaolin i n-butan jako gaz nośny (propelent)

Stosowanie:
Przed zastosowaniem wyrobu należy oczyścić leczone miejsce. Następnie dobrze wstrząsnąć pojemnikiem i trzymając go w pozycji pionowej rozpylić dostateczną ilość pudru aby przykryć powierzchnię rany. Rozpylać z krótkimi przerwami. Po zastosowaniu zaleca się przykrycie leczonej okolicy jałowym opatrunkiem. Stosować raz lub dwa razy dziennie w zależności od stanu klinicznego.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Zaleca się, aby kobiety w ciąży zasięgnęły porady lekarza przed użyciem wyrobu.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.