

Plast.COMPEED nawilżający n/odciski 1,7x5,



Cena: 26,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	6 szt.
Postać	-
Producent	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Hydrokoloidowe nawilżające plastry na odciski, dzięki unikalnemu krążkowi zawierającemu zmiękczające serum zapobiegają odciskom zapewniając zwiększoną ochronę i ciągłe nawilżanie.

Specjalny kształt pozwala owinąć palec. Idealnie przylegają do skóry.

Sposób użycia:

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki.

Usuń górną warstwę papierową, potem dolną warstwę papierową starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.

Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.

Pozostaw plaster na odcisku, aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać.

Dla otrzymania lepszych rezultatów używaj COMPEED® aż do czasu kiedy skóra będzie całkowicie wyleczona z odcisku.