

Disnemar baby d/niemowl.i dzieci aer.donos



Cena: 31,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	25 ml (250 daw.)
Postać	aer.do nosa
Producent	ABBOTT PRODUCTS SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Disnemar baby jest izotonicznym roztworem soli mineralnych o neutralnym pH, który może być stosowany w obrębie jamy nosowej, bez podrażniania błony śluzowej nosa.

Disnemar baby jest wskazany do utrzymywania codziennej higieny nosa i prawidłowego stanu błony śluzowej nosa. Fizjologiczny roztwór soli mineralnych o neutralnym pH oczyszcza oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej nosa i wspomaga jej regenerację. Dzięki mechanicznemu działaniu wypłukującemu łagodzi objawy niedrożności nosa. Specjalnie zaprojektowany dozownik (rozpylacz) wyrobu umożliwia jego podawanie w każdej pozycji (również w pozycji leżącej). Do stosowania u dzieci lub niemowląt od 1. dnia życia

Skład:

woda oczyszczona o neutralnym pH, elektrolity - tzn. jony sodu, potasu, chloru, wodorowęglany, środek konserwujący - chlorek benzalkonium, który zapobiega zakażeniu roztworu przez bakterie.

Stosowanie:

Dzieci i niemowlęta: jedna dawka do każdego otworu nosowego kilka razy na dobę. U niemowląt zaleca się stosowanie wyrobu Disnemar baby przed posiłkiem lub karmieniem, ponieważ udrożnienie nosa umożliwia połykanie pokarmu bez powietrza, dzięki czemu unika się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, związanych z połykaniem powietrza.

Przed podaniem wyrobu Disnemar baby po raz pierwszy należy nacisnąć dozownik 1-3 razy, aby aktywować pompkę dozującą i uzyskać odpowiednie rozpylenie roztworu.

Po dłuższym okresie nieużywania może zaistnieć konieczność powtórzenia wyżej opisanej czynności.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Preparat może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.