


FLOCARE ZEST.grawit.d/wor. 86460

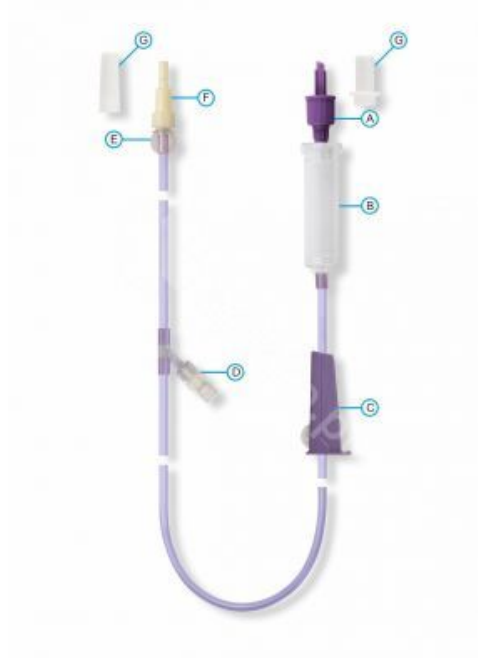

Cena: 16,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	zest.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Flocare® zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit ze złączem przejściowym TRANSITION służy do połączenia worka/opakowania z dietą ze zgłębnikiem.

FLOCARE Zestaw grawitacyjny do worków

Flocare zestaw grawitacyjny do worków umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy zastosowaniu metody grawitacyjnej. Zawartość pozostaje w pełni sterylna do momentu otwarcia opakowania. Metoda wlewu ciągłego za pomocą Flocare zestawu grawitacyjnego do worków minimalizuje ryzyko wystąpienia biegunki i nietolerancji żywienia u pacjenta. Zalecane jest, aby dieta była podawana w temperaturze pokojowej z zachowaniem odpowiedniej prędkości podaży pokarmu na godzinę.

Zestawy żywieniowe do podaży są wyposażone w złącza przejściowe TRANSITION:

1. Na końcu dalszym zestawu w miejscu łączenia zestawu ze zgłębnikiem
2. W porcie medycznym do podawania leków / płukania zgłębnika.


Złącza przejściowe TRANSITION umożliwiają:

- podłączenie zestawu ENFit do zgłębnika ze złączem ENLock
- podłączenie strzykawki LUER i ENLock do portu medycznego zestawu

W przypadku użycia zestawu ze złączem przejściowym TRANSITION do zgłębnika ze złączem ENFit należy odkręcić białe złącze

prześciowe zakończenia zestawu i połączyć odpowiadające sobie złącza ENFit zestawu i zgłębnika.

W przypadku użycia strzykawki enteralnej ENFit do portu medycznego zestawu ze złączem przejściowym TRANSITION należy odkręcić białe złącze przejściowe portu i połączyć odpowiadające sobie złącza ENFit strzykawki i portu medycznego.

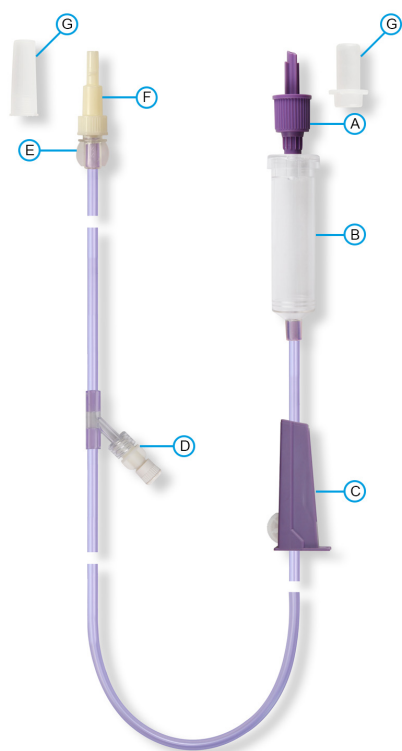

Części składowe

- A. Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
- B. Komora kroplowa
- C. Zacisk rolkowy
- D. Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION. Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu
- E. Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem typu ENFit
- F. Złącze przejściowe (męskie) TRANSITION typu ENLock
- G. Nasadki ochronne