

FLOCARE ZEST.uniwersalny grawitac. 89755



Cena: 24,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	zest.
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

FLOCARE® Uniwersalny zestaw w wersji grawitacyjnej

Flocare® Zestawy uniwersalne do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit i złączem przejściowym TRANSITION służą do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) lub butelki z dietą (butelka 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem.

Umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna).

Łącznik (A) pasuje do butelek o średnicy 26 mm oraz 40 mm.

Zestawy żywieniowe do podaży są wyposażone w złącza przejściowe TRANSITION:

1. Na końcu dalszym zestawu w miejscu łączenia zestawu ze zgłębnikiem
2. W porcie medycznym do podawania leków / płukania zgłębnika.

Złącza przejściowe TRANSITION umożliwiają:

- podłączenie zestawu ENFit do zgłębnika ze złączem ENLock
- podłączenie strzykawki LUER i ENLock do portu medycznego zestawu

W przypadku użycia zestawu ze złączem przejściowym TRANSITION do zglębniaka ze złączem ENFit należy odkręcić białe złącze przejściowe zakończenia zestawu i połączyć odpowiadające sobie złącza ENFit zestawu i zglębniaka.

W przypadku użycia strzykawki enteralnej ENFit do portu medycznego zestawu ze złączem przejściowym TRANSITION należy odkręcić białe złącze przejściowe portu i połączyć odpowiadające sobie złącza ENFit strzykawki i portu medycznego.



Części składowe

- A. Łącznik do butelek - CROSS DESIGN
- B. Łącznik ENPlus pasujący do worków/opakowań z dietą
- C. Komora kroplowa
- D. Zacisk rolkowy
- E. Port medyczny typu ENFit ze złączem TRANSITION. Służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu
- F. Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zglębniakiem typu ENFit
- G. Złącze przejściowe (męskie) TRANSITION typu ENLock
- H. Nasadki ochronne
- I. Koszyk do zawieszania butelki z dietą