

FLOCARE ZGŁ.GASTR.CH18 * 1szt. 94817



Cena: 172,85 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Zgłębnik Flocare typu G-Tube to silikonowy, balonowy zgłębnik z portem do żywienia typu ENFit. Może on być stosowany zarówno jako zamiennik fabrycznego elementu w systemie PEG lub podstawowy zgłębnik gastrostomijny podczas operacji. Flocare G-Tube to zgłębnik, który przy zakładaniu i wymianie nie wymaga użycia endoskopu, co znacznie usprawnia oba te procesy.

Zgłębnik Flocare - niezastąpiony przy żywieniu dojelitowym

Flocare to zgłębnik wykonany z przezroczystego, atestowanego silikonu. Na jego powierzchni została nadrukowana centymetrowa podziałka, która ułatwia precyzyjne założenie. Zgłębnik Flocare został zaprojektowany w taki sposób, że nie sprawia on dyskomfortu u pacjentów. Silikonowa płytka zewnętrzna znacznie ułatwia pielęgnację obszaru skóry otaczającego przetokę. Zapobiega to powstawaniu infekcji lub nieprzyjemnych schorzeń dermatologicznych. Część zgłębnika Flocare znajdująca się na odcinku balonu posiada natomiast cieniодajne właściwości. Dzięki temu element jest widoczny w promieniach RTG, co znacznie ułatwia wykonanie kontrastowego badania przewodu pokarmowego. Dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji zgłębnik Flocare G-Tube może być wymieniany zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w domu. Z tym procesem - oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu - bez problemu poradzi sobie bliski lub opiekun osoby chorej.

Używanie zgłębnika Flocare G-Tube zalecane jest w przypadku konieczności długoterminowego żywienia dojelitowego. Metody tej należy unikać w przypadku wodobrzusza, niedrożności lub zakażenia zatoki bądź zmianach nowotworowych w okolicach otrzewnej.

FLOCARE Zgłębnik Gastrostomijny (G-Tube) CH 18 - 1 szt. 94817

Flocare® Zgłębnik Gastrostomijny (G-Tube) z portem do żywienia typu ENFit jest silikonowym balonowym zgłębnikiem, używanym jako wymiennik istniejącego zgłębnika (PEG, G-Tube lub Button) lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej.

Właściwości

- Wykonany z przezroczystego silikonu
- Zakładanie i wymiana nie wymaga endoskopu
- Może być wymieniany w warunkach szpitalnych i domowych
- Centymetrowa podziałka na zgłębniku ułatwia kontrolę zakładania
- Część zgłębnika znajdująca się na odcinku balonu posiada cieniодajne właściwości widoczne w promieniach RTG
- Jeden centralny otwór na końcu dalszym zgłębnika
- Specjalny kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniają pacjentowi komfort i ułatwiają pielęgnację skóry wokół przetoki
- Koniec bliższy posiada dwa porty: do podawania diety (typu ENFit) i do napełnienia balonu mocującego


Wskazania

- Długoterminowe żywienie przez zgłębnik, przekraczające żywotność początkowo założonego zgłębnika gastrostomijnego
- Dekompresja żołądka

Przeciwwskazania

Zakładanie lub wymiana G-tube są przeciwwskazane w przypadku:

- Niedrożnej lub zakażonej przetoki
- Wodobrzusza
- Zmian nowotworowych otrzewnej

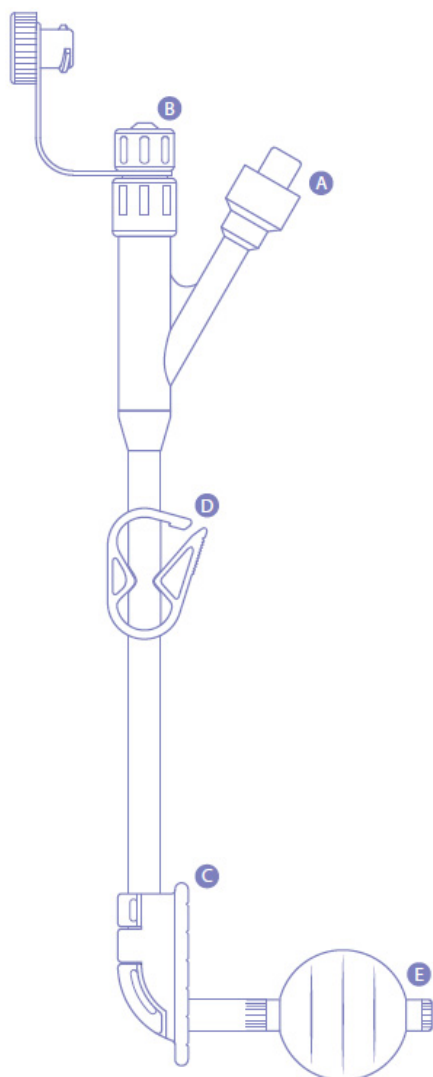

Części składowe

Zgłębnik wykonany jest z przezroczystego silikonu, posiada centymetrową podziałkę na zgłębniku i zawiera:

- A. Port do napełniania balonu wskazujący zalecaną objętość wypełnienia balonu.
Zalecana objętość wypełnienia balonu zależy od rozmiaru Charriere zgłębnika
- B. Port do żywienia (połączenie ENFit z nasadką zamykającą)
- C. Silikonową zewnętrzną płytkę mocującą
- D. Zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się diety lub innej treści żołądka
- E. Silikonowy wewnętrzny balon mocujący, znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu, widoczny w promieniach RTG

Dostępne rozmiary (średnica/długość)

- Ch 14 Balon - 5 ml (Kod produktu: 594815)
- Ch 18 Balon - 15 ml (Kod produktu: 594817)
- Ch 20 Balon - 15 ml (Kod produktu: 594818)
-

Opakowanie

Pakowany pojedynczo w folię

Opakowanie zbiorcze – 2 szt.

Produkt sterylizowany, ważność 5 lat