

Flowflex Covid-19 Antygen koron. *1 test



Cena: 12,82 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Flowflex Covid-19 Antygen koron. *1 test

FlowFlex domowy test do wykrywania wirusa SARS-CoV-2
Szybki test antygenowy do samokontroli wykrywający obecność wirusa SARS-CoV-2

PRZEZNACZENIE:

Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 jest testem paskowym do ilościowego oznaczania antygeny nukleokapsydowego wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazowych z wnętrza przedniej górnej części jamy nosowej, bezpośrednio pobranych od osób podejrzewanych o infekcję COVID-19, w ciągu pierwszych siedmiu dni od wystąpienia objawów. Test można również przeprowadzać na próbkach pobranych od osób, u których nie występują objawy. Test nie różnicuje wirusa SARS-CoV i SARS-CoV-2. Wyniki służą do identyfikacji antygeny SARS-CoV-2. Ten antygen na ogół jest obecny w próbkach pobranych z górnych dróg oddechowych w ostrej fazie infekcji. Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygeny wirusa, jednak niezbędne jest rozważenie indywidualnej historii choroby i dodatkowych informacji niezbędnych do określenia stanu infekcji. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub infekcji współistniejącej z innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie stanowić właściwej przyczyny choroby. Negatywne wyniki u osób z objawami występującymi powyżej siedmiu dni powinny być traktowane jako najprawdopodobniej negatywne. Jeżeli trzeba, proszę powtórzyć test, wykonując badanie molekularne. Negatywne wyniki nie wykluczają infekcji SARS-CoV-2. Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 jest przeznaczony do stosowania jako pomoc w diagnozowaniu infekcji SARS-CoV-2. Użyteczność samokontroli w badaniu osób poniżej 18. roku życia nie została potwierdzona. Sugerujemy, by osoby poniżej 18. roku życia były badane przez osoby dorosłe.

ZASADA DZIAŁANIA:

Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 jest testem do wykrywania antygeny nukleokapsydowego wirusa SARS-CoV-2 w ludzkich próbkach wymazowych z przedniej górnej części jamy nosowej. Wyniki testu są odczytywane po 15-30 minutach w oparciu o obecność lub brak kolorowych linii. Aby test działał zgodnie z procedurą kontroli, kolorowa linia będzie zawsze pojawiała się w obszarze kontrolnym, wskazując, że dodano wystarczającą ilość próbki i wystąpiła absorpcja przez membranę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed przystąpieniem do testu należy uważnie przeczytać ulotkę szybkiego testu antygenowego SARS-CoV-2. Postępowanie niezgodne z zaleceniami może doprowadzić do uzyskania niedokładnego wyniku testu.

Nie należy używać testu po dacie ważności wskazanej na opakowaniu.

Nie jeść, nie pić, ani nie palić przed i w trakcie przeprowadzania testu.

Nie stosować testu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Wszystkie zużyte testy, próbki i potencjalnie skażone materiały powinny zostać wyrzucone zgodnie z lokalnym prawodawstwem.

Wilgotność i temperatura mogą negatywnie wpływać na wyniki.

Linia testowa w przypadku próbek mocno obciążonych wirusem może stać się widoczna już po 15 minutach, lub jak tylko próbka dostanie się w obszar linii testowej.

Linia testowa dla próbek o niewielkim obciążeniu wirusem może stać się widoczna w ciągu 30 minut.

Nie należy pobierać próbek wymazowej z nosa w przypadku wystąpienia krwawienia z nosa.

Dokładnie umyć dłonie po użyciu.

Jeżeli bufor reakcyjny zetknie się ze skórą lub przypadkowo dostanie się do oczu, należy przemyć te miejsca dużą ilością wody, jeśli trzeba, zasięgnąć porady lekarskiej.

PRZECHOWYWANIE:

Zestaw można przechowywać w temperaturach od 2 do 30°C.

Test jest stabilny do dnia daty trwałości nadrukowanej na zabezpieczonej torebce. Nie używać po upływie daty trwałości.

Test musi pozostać w szczelnym opakowaniu do momentu użycia.

NIE ZAMRAŻAĆ.