

Gruszka z miękkim końcem nr 2 ALBERT



Cena: 6,65 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT-POLSKA
Substancja czynna	-

Opis produktu

Gruszka Katar Stop 0-6m (nr 2)

Gruszka to wysokiej jakości wyrób medyczny spełniający wysokie wymagania i normy bezpieczeństwa. Przeznaczony dla dzieci już w pierwszych miesiąca życia. Jest wykonana z najlepszej klasy materiałów plastycznych. Miękką i zaokrągloną końcówką zapewnia bezpieczeństwo i komfort w trakcie stosowania.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji i udrażniania dróg oddechowych dzieci i niemowląt. Systematyczne stosowanie zmniejsza ryzyko infekcji ucha środkowego i zatok, ułatwia oddychanie i zasypianie dziecka.

Dla starszych dzieci zalecamy Gruszkę Katar Stop 6-12 miesięcy oraz Gruszkę Katar Stop powyżej 1 roku.

Sposoby użycia:

Na sucho – zasysanie

Udrażnianie nosa z wydzieliny kataralnej oraz oczyszczanie uszu z wody i woskowiny

Na mokro – irygacja

oczyszczanie wodą nosa, podrażnionej skóry lub części intymnych

Instrukcja użycia:

Ściśnij gruszkę i przyłóż końcówkę do nosa lub ucha dziecka, a następnie delikatnie zasysaj wydzielinę. Przed każdym użyciem wymyj gruszkę bieżącą wodą, a następnie włóż do gotującej się wody na kilka minut.

Produkt nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.

Nie należy stosować środków dezynfekujących.

W razie ewentualnego uszkodzenia wyrzucić gruszkę do kosza.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.