

Hydrosil - leczenie ran żel 75 g (tuba)



Cena: 30,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	75 g (tuba)
Postać	żel
Producent	SEQUOIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Hydrosil to żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran.

Hydrosil to wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska. Hydrosil zawiera karbomer stabilizowany karmozyną (peptyd występujący naturalnie w skórze), który korzystnie wpływa zarówno na suche jak i wilgotne, sączące rany. W przypadku ran suchych, ma działanie okluzyjne, hamuje parowanie wody i zmniejsza utratę płynu przez naskórek. W przypadku ran wilgotnych, sączących pochłania nadmiar płynu, schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z plasterem i/lub bandażem. Zamiast drażniących parabenów jako środek konserwujący do leku dodano cytrynian srebra.

Skład:

Kwaśny koloidalny karbomer, karmozyna, woda, cytrynian srebra.

Wskazania:

- Rany (w tym chirurgiczne)
- Odleżyny i odparzenia
- Otwarte owrzodzenia
- Oparzenia

Sposób użycia:

:Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu Hydrosil na ranę.

Zamknięte rany:

- oczyścić i zdezynfekować leczony obszar,
- nałożyć Hydrosil na ranę, nie dotykając rany końcówką pojemnika,

- w razie potrzeby założyć bandaż lub plaster.

Otwarte rany:

- oczyścić i zdezynfekować ranę, a dokładnie i delikatnie osuszyć
- nałożyć grubą warstwę preparatu (0,5 - 0,75 cm) na ranę,
- założyć bandaż lub plaster, a opatrunek pozostawić na okres od jednego do trzech dni, do czasu wchłonięcia żelu,
- zmniejszyć ilość stosowanego preparatu Hydrosil, gdy na ranie pojawi się strup.

Oparzenia:

Uwaga! Należy najpierw przemyć wodą, następnie przejść do pozostałych punktów.

Natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod bieżącą, letnią wodą przez około 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika.

Aby zapobiec hipotermii, szczególnie w przypadku oparzenia dużej powierzchni ciała, nie zaleca się stosowania zimnej wody.

Hydrosil należy zastosować dopiero w następnej kolejności, po odpowiedniej ocenie ciężkości oparzenia postępując według instrukcji powyżej (zamknięte rany/otwarte rany).

Uwaga:

Nie stosować preparatu w okolicy oczu, powiek i błon śluzowych.

Należy bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza w przypadku:

- dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,
- silnie zakażonych ran
- wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań