

KLESZCZ OUT - Przyrząd do usuwania kleszczy



Cena: 27,93 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT-POLSKA
Substancja czynna	-

Opis produktu

Przyrząd do usuwania kleszczy KLESZCZ OUT

Przyrząd służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka oraz jadu po ukąszeniach owadów (komarów, pszczoł, szerszeni itp), żmij, skorpionów. Doskonale sprawdza się przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Dwa sposoby użycia:

do usuwania kleszczy – z ciała człowieka

do usuwania jadu po ukąszeniach

– owadów (komarów, pszczoł, szerszeni itp), żmij, skorpionów.

Zasada działania:

Przyrząd do usuwania kleszczy KleszczOut jest prostą w użyciu pompką, która pozwoli szybko i precyzyjnie pozbyć się kleszcza z ciała.

Wszechstronna i wysokiej jakości pompka poradzi sobie nie tylko z kleszczem, ale również zassie jad po ukąszeniu – komarów, pszczoł, czy nawet żmij i skorpionów.

Powstała w końcówce pompki próżnia powoduje “wysanie” kleszcza z ciała i nie pozostawia żadnych części pasożyta w ciele człowieka. Przyrząd jest najbardziej skuteczny we wstępnym okresie wszczępienia się kleszcza. W przypadkach bardziej skomplikowanych należy niezwłocznie udać się do lekarza. Dzięki zastosowaniu bardzo szczelnej, gumowej uszczelki, skuteczność działania pompki jest zagwarantowana na bardzo długi czas.

Sposób użycia:

1. Aby przygotować przyrząd do użycia, należy wcisnąć gumowy tłok do oporu.
2. Przyłożyć końcówkę do ciała w miejscu wszczępienia się kleszcza (wprowadzenia jadu).
3. Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymując docisk, stopniowo, powoli odciągać tłok do odpowiedniej pozycji. Miejsce ukąszenia powinno znajdować się w centralnej części przyłożenia końcówki.
4. Przytrzymać przyrząd w tej pozycji około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórzyć zabieg.
5. Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi.
6. Końcówkę przyrządu przemywać wodą z mydłem, zdezynfekować środkiem odkażającym.