

# Multi Test d/wykryw.narkot.w moczu 1op.



Cena: 29,19 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op.
Postać	-
Producent	HYDREX PRZED.TECH.HANDL.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Multi Test d/wykryw.narkot.w moczu 1op.

Multi Test jest testem wieloparametrowym i składa się z 4 pasków testowych umieszczonych w jednej plastikowej obudowie. Każdy pasek odpowiada za wykrycie innego narkotyku: MOR - morfiny i heroiny, COC - kokainy, AMP - amfetaminy, THC - marihuany i haszyszu.

Oznaczenie powinno być wykonane z próbki świeżego moczu, zebranego do czystego i suchego pojemnika. Wynik odczytuje się, niezależnie dla każdego narkotyku, po 5 minutach od momentu zanurzenia panela pasków testowych w moczu.

#### WAŻNE UWAGI:

- Jeśli uzyskałeś wynik dodatni dla któregośkolwiek narkotyku obserwuj osobę, której mocz badałeś. Jeśli wynik dodatni będzie się powtarzał, zgłoś się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc. Jeśli uzyskałeś wyniki ujemne, nie oznacza to, że osoba której mocz badałeś, nie zażywa narkotyków. Istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, które dodane do moczu z narkotykiem, dają wynik fałszywie ujemny. Jeśli upłynął zbyt długi czas od momentu użycia narkotyku, to jego poziom w badanym moczu jest tak niski, że test go nie wykrywa.

- Zawsze kontaktuj się z lekarzem przed podjęciem ważnych decyzji medycznych.

- Pozostałe po wykonaniu badania składniki testu możesz usunąć do śmietnika z odpadami domowymi.