

## Mustico Tick-Off, spray, d/usuwania kleszczy 2w1, 8 ml



Cena: 18,33 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	8 ml
Postać	spray
Producent	BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### MUSTICO TIC-OFF spray do bezpiecznego usuwania kleszczy

#### MUSTICO TIC-OFF TO IDEALNE NARZĘDZIE DO USUWANIA KLESZCZY

Kleszcze to pajęczaki, które mogą być niebezpieczne z uwagi na fakt, że przenoszą groźne bakterie oraz wirusy. W przypadku kiedy dojdzie do ugryzienia, niezwykle istotne jest odpowiednie oraz szybkie działanie, gdyż nieprawidłowy sposób usuwania kleszczy, grozi powikłaniami zdrowotnymi. Może doprowadzić do boreliozy, a nawet wirusowego zapalenia mózgu.

Smarowanie tłuszczem, przypalanie lub potraktowanie środkami dezynfekującymi, powoduje u kleszczy reakcję wypluwania śliny, która może zawierać groźne bakterie i wirusy.

Z kolei wyjmowanie kleszczy palcami, rozgniatanie czy wyciskanie stwarza również niebezpieczeństwo pozostawienia w skórze resztek kleszcza w postaci główki i tułowia.

Idealnym rozwiązaniem jest szybkie zamrożenie kleszcza sprayem, a następnie precyzyjne usunięcie go stworzoną do tego pęsetą.

Mustico Tick-Off to nowoczesny wyrób medyczny umożliwiający proste, szybkie i bezpieczne usuwanie kleszczy.

Zabija kleszcza poprzez natychmiastowe zamrożenie, ułatwiając jego bezpieczne usunięcie, a tym samym ograniczając ryzyko boreliozy oraz innych chorób.

#### Cechy:

- wyrób medyczny klasy I
- nietoksyczny
- umożliwia bezbolesne i bezpieczne usuwanie kleszczy

zamraża kleszcza natychmiast, ograniczając ryzyko boreliozy  
dla dzieci od 3 roku życia  
opakowanie zawiera spray (8 ml) i pęsetę do usuwania kleszczy

**Sposób użycia:**

1. Wycelować końcówkę rurki dozującej umieszczonej u góry pojemnika w część głowową kleszcza wbitą w skórę nosiciela.
2. Spryskać, aż strumień się zatrzyma. Do skutecznego zabicia kleszcza niezbędne jest od 1 do 3 rozpyleń. Nie należy przekraczać 3 rozpyleń na miejsce.
3. Rozpylona ilość środka natychmiast zamraża kleszcza i powoduje wycofanie narządu gębowego. Chwycić kleszcza za pomocą pęsety. Lekko poruszyć na boki i usunąć.
4. Zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.
5. Pęsetę po wykonanym zabiegu należy zdezynfekować.