

OPASKA ELASTYCZNA STAWU KOLANOWEGO OPASK M



Cena: 25,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	PANI TERESA MEDICA S.A.
Substancja czynna	-

Opis produktu

OPASKA ELASTYCZNA STAWU KOLANOWEGO PANI TERESA rozmiar M

obwód nogi nad kolanem 39 - 47 cm

Wskazania:

- w przewlekłych zmianach zwyrodnieniowo-reumatycznych stawu kolanowego;
- po zdjęciu opatrunków gipsowych - wzmacnia i stabilizuje kolano;
- przed i po operacjach uszkodzonych łątek;
- w przypadkach zwichnięć lub obrażeń kolana;
- zapobiega obrzękom, łagodzi ból;
- wzmacnia aparat więzadłowy stawu przy wysiłku fizycznym.

Sposób użycia opaski:

Dopasowanie rozmiaru:

W celu prawidłowego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodu nogi nad kolanem, a następnie wybrać rozmiar z tabeli na opakowaniu.

Sposób zakładania:

Opaskę naciągnąć od dołu na wysokość stawu kolanowego.
Nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzoną skórę.

Uwagi:

- Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem. W czasie noszenia opaski zalecane jest wykonywanie podstawowego zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ciągłe stosowanie opaski bez wykonywania ćwiczeń może doprowadzić do osłabienia mięśni.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i zacienionym miejscu.
- Prać ręcznie w temperaturze 40°C przy użyciu delikatnych środków piorących np. przeznaczonych do prania wełny. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia! Nie prasować! Nie chlorować!