

## Plast.COMPEED odciski m/palc.stóp 2,2x2,2c



Cena: 25,17 PLN

### Opis słownikowy

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Dawka             | -                                   |
| Opakowanie        | 10 szt.                             |
| Postać            | -                                   |
| Producent         | JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O. |
| Substancja czynna | -                                   |

### Opis produktu

COMPEED Plastry na odciski między palcami przynoszą natychmiastową ulgę w bólu i pomagają usunąć odciski. Pozostają na miejscu ponad 24 godziny zapewniając optymalną ochronę przed otarciami i uciskiem. Specjalny kształt zapewnia właściwe dopasowanie.

Plastry na odciski dzięki technologii hydrokoloidowej pomagają utrzymać naturalną wilgotność skóry, aby przynieść natychmiastową ulgę w bólu nawilżyć i zmiękczać odcisk, pomagając go usunąć, posiadają wgłębienie zmniejszające ucisk.

#### Sposób użycia

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki.

Usuń górną warstwę papierową, potem dolną warstwę papierową starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.

Nałóż plaster mocno na odcisk, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.

Pozostaw plaster na odcisku, aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać.

Dla otrzymania lepszych rezultatów używaj COMPEED® aż do czasu kiedy skóra będzie całkowicie wyleczona z odcisku.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.