

## Plast.COMPEED zwyr.kostne halluksy 4,7x6,8

Cena: 26,48 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	5 szt.
Postać	-
Producent	JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### COMPEED® Plastry na zwyrodnienia kostne halluksy 5 szt.

Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel wspomagający nawilżanie. Plastry COMPEED® działają jak druga skóra, aby:

uśmierzać natychmiastowo ból i ucisk,  
chronić halluksy przed kolejnymi otarciami,  
zapobiegać pęcherzom oraz twardnieniu skóry.

Pozostają na miejscu przez kilka dni.

W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.

#### Sposób użycia

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta halluksem nie jest tłusta od kremu czy oliwki. Usuń jedną papierową warstwę, następnie drugą, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej. Nałóż plaster mocno na halluks, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry. Pozostaw plaster na halluksie aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni. Zmieniaj plaster COMPEED® na nowy tak często, jak jest to potrzebne.