

## Plast.na odciski z kwasem salicylowym 8szt



Cena: 13,03 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	8 sztuk.
Postać	-
Producent	LANGSTEINER SP. Z O.O.
Substancja czynna	Acid.salicylic.

### Opis produktu

#### Plastry na odciski z kwasem salicylowym, 8 sztuk

Plastry na odciski z kwasem salicylowym firmy Langsteiner są stosowane do łagodnego usuwania odcisków i zabezpieczania ich przed dodatkowymi urazami. Plastry są wyrobem medycznym.

#### Wskazania i przeciwwskazania:

Tylko do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nakładać plastra na okolice odcisku, jeżeli skóra jest podrażniona lub występują stany zapalne. Nie stosować w przypadku uczulenia na kwas salicylowy i inne składniki produktu. Unikać stosowania w ciąży i w trakcie karmienia piersią. Zaprzestać stosowania i zdjąć plastry w przypadku mocnego podrażnienia i odczuwalnych dolegliwości (pieczenie, zaczerwienienie) lub nadwrażliwości na produkt. Osoby chore na cukrzycę – stosować po konsultacji z lekarzem.

#### Dawkowanie:

Na czystą i suchą stopę nałożyć plaster tak, aby substancja czynna przylegała do odcisku. Stosować plastry do momentu aż odcisk zostanie usunięty. Każdy plaster należy nałożyć na ok. 24 godziny. Po zakończeniu kuracji można usunąć środkową część odcisku stosując ciepłą kąpiel stóp z użyciem soli i mydła. Jeżeli w trakcie zabiegów skóra stanie się wrażliwa i pojawi się zaczerwienienie, poczekać z nałożeniem kolejnych plastrów.

#### Opakowanie:

8 sztuk w kartonowym pudełku