

Protefix krem mocujący 40 ml. KREM 47 G



Cena: 16,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	47 g
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Substancja czynna	-

Opis produktu

PROTEFIX® KREM MOCUJĄCY (ORYGINALNA FORMUŁA)

Protefix® krem mocujący w oryginalnej formule jest bardzo skuteczny w przypadku większości problemów z mocowaniem protezy. Odznacza się dużą siłą mocowania przez wiele godzin, zarówno w warunkach utrudnionej przyczepności jak i przy intensywnej produkcji śliny.

KREM MOCUJĄCY PROTEFIX® (w odróżnieniu od innych kremów mocujących):

- nanosi się bezpośrednio na wilgotną protezę
- daje się łatwo rozprowadzać na protezie
- siła mocowania utrzymuje się przez 8 do 16 godzin
- ma neutralny smak i daje się łatwo usuwać z protezy (opinia 90 % użytkowników).
- nie zawiera cynku !

Sposób użycia:

Protezę i jamę ustną oczyścić dokładnie z resztek jedzenia. Krem mocujący nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę (zgodnie z rysunkiem). W razie potrzeby krem można nałożyć również na tylną część protezy szczęki górnej. Przy nakładaniu kremu tubę naciskać w części bliżej ujścia tubki.

Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej jego ilości maleje skuteczność działania mocującego. Dodatkowo zbyt grubą warstwę kremu trudniej jest usuwać z protezy lub z podniebienia.

Protezę założyć i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut. Resztki kremu mocującego można łatwo usunąć przy pomocy wacika zwilżonego olejem jadalnym.

Ważne:

Po użyciu należy starannie zamknąć tubkę, przy czym jej otwór powinien pozostawać czysty i suchy. Resztki wilgoci po dostaniu się do tuby mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Krem przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25 o C), w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.

Działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć nadwrażliwości na poszczególne składniki kremu. W przypadku zaostnienia podejrzenia reakcji alergicznej prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.