

PROTEFIX - KREM MOCUJĄCY HYPOALERGICZNY KR



Cena: 17,76 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	40 ml
Postać	-
Producent	QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
Substancja czynna	-

Opis produktu

KREM MOCUJĄCY PROTEFIX® HYPOALREGICZNY

Protefix® krem mocujący HYPOALERGICZNY nie zawiera konserwantów, barwników ani substancji aromatycznych. Mogą go więc stosować osoby szczególnie podatne na reakcje uczuleniowe: zmniejsza ryzyko reakcji alergicznej. Jednocześnie zachowuje wszystkie właściwości mocujące oryginalnego kremu Protefix®.

KREM MOCUJĄCY PROTEFIX® (w odróżnieniu od innych kremów mocujących):

- nanosi się bezpośrednio na wilgotną protezę
- daje się łatwo rozprowadzać na protezie
- siła mocowania utrzymuje się przez 8 do 16 godzin
- ma neutralny smak i daje się łatwo usuwać z protezy (opinia 90 % użytkowników).
- nie zawiera cynku!

Sposób użycia:

Protezę i jamę ustną oczyścić dokładnie z resztek jedzenia. Krem mocujący nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę (zgodnie z rysunkiem). W razie potrzeby krem można nałożyć również na tylną część protezy szczęki górnej. Przy nakładaniu kremu tubę naciskać w części bliżej ujścia tubki.

Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej jego ilości maleje skuteczność działania mocującego. Dodatkowo zbyt grubą warstwę kremu trudniej jest usuwać z protezy lub z podniebienia.

Protezę założyć i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut. Resztki kremu mocującego można łatwo usunąć przy pomocy wacika zwilżonego olejem jadalnym.

Ważne:

Po użyciu należy starannie zamknąć tubkę, przy czym jej otwór powinien pozostawać czysty i suchy. Resztki wilgoci po dostaniu się do tuby mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego. Krem przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25 °C), w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.

Działania niepożądane:

W pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć nadwrażliwości na poszczególne składniki kremu. W przypadku zaostnienia podejrzenia reakcji alergicznej prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.