

# SCHOLL Zestaw na wrastające paznokcie 1zes



Cena: 98,60 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 zest.
Postać	-
Producent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LTD
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### SCHOLL Zestaw na wrastające paznokcie

#### 1. CHŁODZĄCY SPRAY W AEROZOLU

Spray chłodzi i uśmierza ból. Oto instrukcja użycia w punktach:

- Porządnie wstrząśnij pojemnikiem
- Rozpyl z odległości 10 cm na obszar paznokcia i otaczającej go skóry palca
- Pozwól, aby spray wysechł przez ok. 1 minutę
- Spray można używać do 5 razy dziennie
- Pomiędzy użyciami należy zrobić co najmniej godzinną przerwę

Spray należy nakładać pojedynczym naciśnięciem tłoczka.

#### 2. KLAMRA NA PAZNOKIEĆ

Klamra podnosi krawędź paznokcia powstrzymując jego wrastanie w skórę, pozwala też, aby paznokieć rósł dalej pod właściwym kątem.

- Nałóż cienką warstwę kleju – jest on częścią zestawu, na górną powierzchnię paznokcia
- Żeby nałożyć klamrę paznokieć powinien wyrastać na minimum 2 mm ponad palec
- Umieść klamrę na krawędzi paznokcia, upewniając się, że brzegi klamry są zakleszczone po obu stronach paznokcia. Zalecenie: najpierw włóż jeden zaczepek klamry pod paznokieć z jednej strony, a następnie z drugiej)
- Dociśnij delikatnie górną część klamry do paznokcia. Trzymaj aż do wyschnięcia kleju. Uważaj, aby nie dotknąć kleju.

Zaleca się wymieniać klamrę raz na tydzień.

