

SOLbaby ASPIRATOR do nosa 1 op.



Cena: 23,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op.
Postać	-
Producent	SEQUOIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Aspirator do nosa dla niemowląt z 3 jednorazowymi końcówkami Extra Soft.

Przynosi ulgę w przeziębieniu, zapaleniu zatok i schorzeniach, którym towarzyszy powstawanie wydzieliny.

Aspirator do nosa SOLbaby ASPIRATOR jest wyrobem medycznym przeznaczonym do bezpiecznego usuwania wydzieliny i śluzu z nosa dziecka poprzez delikatne odsysanie. Każdy zestaw zawiera filtr pochłaniający, który zatrzymuje śluz. Zapewnia to skuteczność i higienę procesu. Końcówka wymienna jest jednorazowa. Po każdym użyciu należy ją wyrzucić, aby zapobiec dodatkowym infekcjom. Aspirator do nosa SOLbaby ASPIRATOR może być używany wyłącznie z oryginalnymi końcówkami SOLbaby KOŃCÓWKI DO ASPIRATORA.

Dodatkowe jednorazowe końcówki Extra Soft są dostępne w opakowaniach zawierających 10 sztuk. Każda końcówka zawiera filtr pochłaniający, który zapewnia doskonałą higienę.

Sposób podawania:

- Ułożyć dziecko w pozycji leżącej na plecach, na wygodnej i bezpiecznej powierzchni.
- Przyłączyć wymienną końcówkę do korpusu aspiratora.
- Wprowadzić węższą stronę końcówki do otworu nosowego dziecka. Przy użyciu ustnika z wężykiem elastycznym delikatnie odessać wydzielinę. Filtr pochłaniający aspiratora zatrzymuje wydzielinę, dzięki czemu zapobiega przedostaniu się jej do wężyka i dalej do ust. Powtórzyć czynności dla drugiego otworu nosowego przy użyciu tej samej końcówki.
- Odłączyć końcówkę od korpusu aspiratora i wyrzucić.
- W celu zmniejszenia gęstości wydzieliny można przepłukać nos roztworem soli fizjologicznej (SOLbaby WODA MORSKA).