

SOPELEK 3+ vacuum opc.d/odkurz.(ap.+10f)



Cena: 30,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Aspirator do nosa SOPELEK3+ odciąganie za pomocą odkurzacza.

Umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu w przywróceniu swobodnego oddychania. Systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła, ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz pomaga w leczeniu schorzeń dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc). Jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne dla niemowląt SOPELEKbaby mają zastosowanie w trakcie przewijania dziecka w domu, przychodni czy podróży.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ASPIRATOR DO NOSA SOPELEK3**–ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ ODKURZACZA.**

Metoda może służyć tylko do usuwania zalegającej wydzieliny.

Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem sprawdzić czy poszczególne elementy nie są uszkodzone, następnie każdy element umyć w ciepłej wodzie.

1. Włóż jednorazowy filtr (A1) do korka (B1), a następnie korek(B1) do cylindra głównego(B). Nałóż końcówkę (A) na cylinder główny (B) aspiratora, a wąż (E) połącz z adapterem (D) z jednej strony i korkiem (B1) z drugiej.

2. Włóż adapter (D) do rury ssącej odkurzacza, odsuń odkurzacza na max. odległość od dziecka, następnie włącz urządzenie .

Do procesu usuwania wydzieliny z noska używamy odkurzaczy o mocy

500-1000 W.

3. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji i delikatnie dosuń końcówkę (A) Aspiratora w pobliże jednego, następnie drugiego otworu nosowego

dziecka (odciąganie powinno trwać max. 5 sekund, ruch góra- dół).

4. Wyłącz odkurzacz, wyjmij zanieczyszczoną końcówkę (A) z cylindra głównego (B), a jednorazowy filtr (A1) z korka (B1). Filtr (A1) wyrzucić

wyrzucić do kosza. Pozostałe elementy wyparzyć w gorącej wodzie (ok. 90stC) przez max. 15 sekund. Adapter (D) i wężyk (E) nie wymagają wyparzania, wystarczy przemyć ciepłą wodą.

5. Wysusz wszystkie elementy i ułóż w pudełku.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

Z uwagi na umieszczony w korku adaptera otwór bezpieczeństwa siła ssąca odkurzacza jest zredukowana, dzięki czemu aspirator jest bezpieczny przy stosowaniu u dzieci.

Aspirator SOPELEK3+ wyróżnia się tym, że odciągana wydzielina przy zastosowaniu siły ssącej odkurzacza jest zatrzymywana na filtrze (A1) umieszczonym w korku (B1).

1. Jeżeli błona śluzowa nosa dziecka jest wysuszona lub widoczna jest duża ilość gęstej wydzieliny, zaaplikuj uprzednio do każdego otworu nosowego dziecka 3-4 krople soli fizjologicznej lub specjalnego donosowego roztworu wody morskiej.

2. Aspirator SOPELEK3+ przechowuj w opakowaniu (pudełku) w suchym i czystym miejscu.

3. Proces odciągania wydzieliny z nosa dziecka może zostać przeprowadzony tylko przez osobę dorosłą.

4. Do procesu odciągania można zastosować odkurzacz o max mocy 1000 Wat.

5. Nie stosować aspiratora w przypadku uszkodzeń błony śluzowej nosa, krwawienia lub hemofilii.

6. Jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne Sopelek baby są przeznaczone do użytku jednorazowego. Podkłady uszkodzone, zawilgocone lub mokre nie nadają się do użycia.