

## Staxedir maść hemostatyczna 30ml DIATHER

Cena: 28,50 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 ml
Postać	-
Producent	DIATHER PETRUSEWICZ SP.K.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### STAXEDIR™ maść hemostatyczna na krwawienia 30ml,

Wyrób medyczny pod postacią maści, przeznaczony do stosowania w celu zapobiegania i powstrzymania krwawienia ze skóry i błon śluzowych.

#### ZASTOSOWANIE

Maść hemostatyczna STAXEDIR zapobiega i hamuje krwawienia ze skóry i błon śluzowych, takich jak: krwotok z nosa wywołany samoistnie lub spowodowany urazem, krwawienie z dziąseł, czy krwawienia zewnętrzne ze skóry.

#### WSKAZANIA:

Wyrób medyczny dedykowany osobom:

- **z chorobami nosa i zatok:** infekcje, polipy nosa, zapalenie błony śluzowej nosa lub przewlekłe stany zapalne mogą zwiększać ryzyko krwawień.
- **po zabiegach laryngologicznych i innych:** krwawienie po operacjach laryngologicznych np. przegrody nosa, po operacjach plastycznych.
- **z predyspozycjami do krwawień z nosa** – w okresie jesienno-zimowym: w suchym klimacie błona śluzowa nosa może być bardziej podatna na uszkodzenia i krwawienia (okres grzewczy).
- **przyjmującym leki przeciwkrzepliwe**
- Dzieci i osoby starsze: krwawienie z nosa występuje częściej u dzieci i osób starszych.
- Pacjent alergiczny: reakcje alergiczne prowadzą do stanu zapalnego błony śluzowej nosa, co z kolei może powodować podrażnienie i osłabienie naczyń krwionośnych w nosie.
- **narażonym na urazy nosa:** pacjenci, którzy często poddawani są urazom nosa (na przykład sportowcy, bokserzy), mogą być bardziej narażeni na krwawienia z nosa.
- Pacjent z chorobami przewlekłymi: osoby cierpiące na schorzenia takie jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi, cukrzyca, czy stany zapalne.

## CHARAKTERYSTYKA:

STAXEDIR zawiera w składzie kompleks EMOXILANE®, który działa :

- **Hemostatycznie antyfibrynolitycznie i prokoagulacyjnie:** hialuronian sodu
- **Antyoksydacyjnie:** witamina E i octan witaminy E, pantenol
- **Przeciwdrobnoustrojowo:** cytrynian srebra
- **Przeciwzapalnie, regenerująco i nawilżająco:** pantenol, kwas hialuronowy

Hialuronian sodu – posiada działanie prokoagulacyjne i regenerujące. W efekcie działania kwasu hialuronowego przyspieszane są zarówno procesy krzepnięcia oraz późniejszej adhezji i proliferacji komórek śródbłonna w procesie gojenia rany.

Witamina E, Octan witaminy E – wywiera działanie antyoksydacyjne, chroniąc nabłonek i śródbłonek przed uszkodzeniami i zapewniając integralność tych tkanek.

Roztwór cytrynianu srebra – wywiera działanie przeciwbakteryjne, hamując wzrost bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, ograniczając w ten sposób proces zapalny w jamie nosowej.

Pantenol (prowitamina B5) – działanie nawilżające błonę śluzową nosa (utrzymując jej odpowiednie nawodnienie i zapewniając w ten sposób działanie barierowe), a także działanie przeciwzapalne i łagodzące podrażnienia.

## SKŁAD:

Woda, EMOXILANE® (pantenol, hialuronian sodu, witamina E, octan tokoferolu, roztwór cytrynianu srebra), gliceryna, arginina, 1,2-heksadienol, glikol kaprylowy, tropolon, karbomer, kopolimer, kwasu akrylowego, EDTA disodowy.

## SPOSÓB UŻYCIA:

**Hamowanie krwawienia:** pokryć odpowiednią ilością maści krwawiące miejsce.

**Zapobieganie nawrotom krwawienia:** stosować maść dwa razy dziennie, przez co najmniej dwa tygodnie po ostrym epizodzie krwawienia lub zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku stosowania na błonę śluzową nosa zaleca aplikację bezpośrednią z długiej końcówki. Ze względów higienicznych zaleca się używanie aplikatora przez jedną osobę

#### PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją użycia wyrobu. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w sposób niedostępny dla dzieci.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego:

Pieczenie, swędzenie w nosie i wyciek z nosa mogą pojawić się w pierwszych dniach leczenia i zwykle ustępują w trakcie terapii. Jeśli objawy te utrzymują się, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.