

Test COVID-19 sars

Cena: 1,21 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Substancja czynna	-



Opis produktu

Test SGTi-Flex COVID-19 Ag 1 szt

SGTi-flex COVID-19 Ag (1 test) domowy, kasetkowy test przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 w próbce z wymazu z nosa. Test potwierdzający zakażenie COVID-19.

ZASTOSOWANIE

Szybki test przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w próbce wymazu z nosa, krótki czas wykonania testu, wynik już w ciągu 15 minut.



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Test COVID-19 Ag SGTi-flex jest przeznaczony do wykrycia obecności antygeny wirusa SARS-CoV-2. Za pomocą testu stwierdza się zakażenie SARS-CoV-2, co jest pomocne w diagnozowaniu COVID-19. W czasie testu próbka z materiałem badanym (wymaz z nosa), poddana jest reakcji ze swoistymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko antygenom wirusa SARS-CoV-2. Membrana nitrocelulozowa kasety testowej zawiera linię testową i linię kontrolną. Test do samokontroli.

WSKAZANIA DO WYKONYWANIA TESTU


- gorączka
- zmęczenie
- suchy kaszel
- utrata węchu i smaku
- bóle mięśni

Schemat użycia

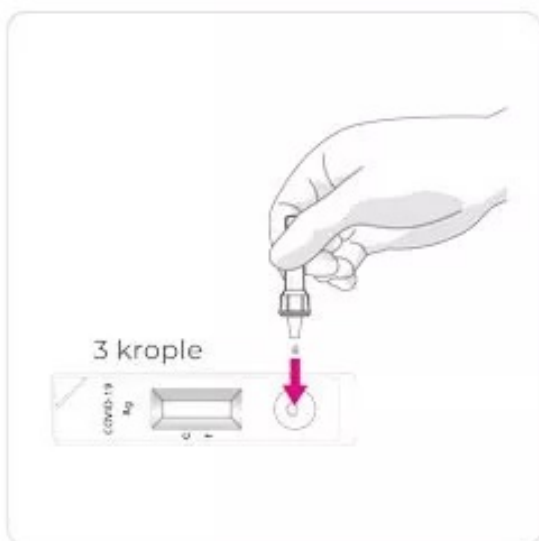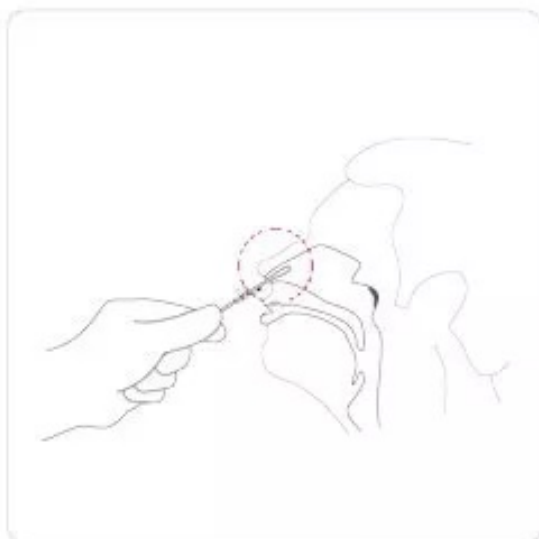

Interpretacja wyników


Wynik pozytywny

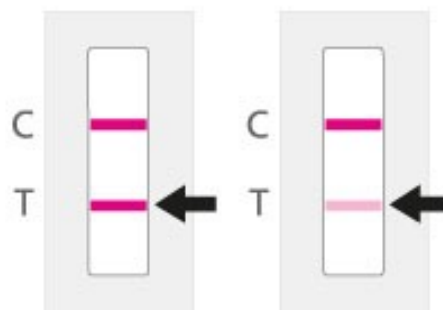

Wynik negatywny



Wynik nieważny

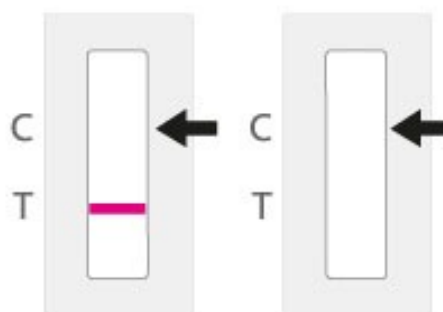

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 saszetka z testem kasetkowym
- 1 bufor ekstrakcyjny
- 1 końcówka zakraplająca
- 1 wymazówka
- instrukcja obsługi