

Test krew utajona w kale, TFO-602H, 1 szt

Cena: 10,93 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Substancja czynna	-

Opis produktu

TEST KREW UTAJONA W KALE, TFO-602H, 1 szt

TEST KREW UTAJONA W KALE (1 test) domowy, kasetkowy test do wykrywania krwi utajonej w kale

WSKAZANIA

Jeśli masz dolegliwości bólowe żołądka, nagle tracisz na wadze, odczuwasz uczucie ciężkości lub posiadasz rodzinne predyspozycje do raka jelita grubego, niniejszy test może stanowić dla Ciebie kluczowe narzędzie diagnostyczne.

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

- ukończenie 50 roku życia

- predyspozycje rodzinne do występowania raka jelita grubego
- niestrawność
- uczucie ciężkości,
- bóle żołądka
- biegunka
- osłabienie i spadek wagi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Niektórzy pacjenci mają predyspozycje rodzinne do występowania problemów związanych z układem pokarmowym, włączając w to **raka jelita grubego**. Rekomendowane jest regularne wykonywanie tego typu testu, zwłaszcza **dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia** oraz dla tych, u których istnieje **podejrzanie o nowotwór jelita grubego**.

Wśród dodatkowych sygnałów wskazujących na konieczność przeprowadzenia testu można wymienić: **obecność bólów żołądkowych, nagły spadek wagi, uczucie nieprzyjemnej ciężkości** oraz **podejrzanie stanów zapalnych jelit**. Test na obecność utajonej krwi w kale jest również wartościowym narzędziem w diagnozowaniu różnorodnych **owrzodzeń, polipów i innych stanów zapalnych**.

Wykrycie krwi w stolcu może być efektem różnych czynników, dlatego po przeprowadzeniu testu istotne jest skonsultowanie się z lekarzem. Specjalista będzie w stanie przeprowadzić dalsze badania, które pozwolą zidentyfikować źródło krwawienia oraz umożliwi zaplanowanie sposobu leczenia.

JAK WYKONAĆ BADANIE?

Krok 1: Proste pobranie: Za pomocą aplikatora pobierz próbkę kału, wbijając go w 3 różne miejsca!

Krok 2: Wymieszanie próbki: Energetycznie potrząśnij pojemnikiem przez 2 minuty, aby dobrze wymieszać próbkę.

Krok 3: Aplikacja próbki: Na pole oznaczone symbolem „S” nanieś dokładnie 2 krople otrzymanego

odczynnika. To pierwszy krok w kierunku otrzymania dokładnego wyniku!

Krok 4: Czekanie i Odczyt: Odczekaj jedynie 5 minut, a następnie spójrz na wynik.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 saszetkę z testem kasetkowym
- 1 pojemnik z odczynnikiem oraz aplikatorem do pobrania próbki
- 1 podkładka papierowa do pobrania próbki
- instrukcja użycia.

Producent: Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. **Podmiot odpowiedzialny:** DIATHER Petruszewicz Sp. K.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.