

Test narkotykowy ze śliny test 1 szt.

Cena: 49,18 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	test
Producent	HYDREX PRZED.TECH.HANDL.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Test do wykrywania narkotyków w ślinie, 1 szt.

Test narkotykowy ze śliny przeznaczony jest do jednoczesnego wykrywania w ślinie narkotyków: morfiny, heroiny, amfetaminy, marihuany, haszyszu i kokainy. Test należy stosować wówczas, gdy nie wiadomo dokładnie, który z narkotyków został użyty. Badanie polega na pobraniu próbki śliny przy pomocy specjalnego próbnika i pojemnika na próbkę, a następnie wprowadzeniu po 3 krople śliny do dwóch okrągłych okienek na płytce testowej.

Wynik testu w postaci barwnych prążków odczytuje się już po 10 minutach.

WAŻNE UWAGI:

Jeśli uzyska się wynik dodatni dla któregośkolwiek narkotyku, należy obserwować badaną osobę i jej zachowanie.

Jeśli wynik dodatni będzie się powtarzał, należy zgłosić się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc.

Wynik ujemny generalnie oznacza, że w badanej ślinie nie zostały wykryte narkotyki lub ich metabolity. Jednak otrzymanie wyniku ujemnego nie zawsze oznacza, że osoba, której ślina była badana, nie brała narkotyków.

Zawsze kontaktuj się z lekarzem przed podjęciem ważnych decyzji medycznych.

Pozostałe po wykonaniu badania składniki testu możesz usunąć do śmietnika z odpadami domowymi.