

Test Pink Super Czuły 1 szt.



Cena: 15,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX DIAGNOSTIX SP. Z O.O.SP.K.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Pink Super Czuły, test,ciążowy, płytkowy, 1 szt.

Test Płytkowy (Pink Test) jest najpopularniejszą formą testu ciążowego w Polsce. Wykonanie badania jest bardzo proste - polega na pobraniu porannego moczu do suchego i czystego pojemnika, a następnie naniesieniu 3 kropli - przy pomocy załączonej sterylnej pipetki - na płytkę testową. Wynik testu w postaci dwóch (wynik pozytywny) lub jednego (wynik negatywny) barwnego prążka na płytce testowej można odczytać już po 2 minutach. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

Badanie testem ciążowym PINK można wykonać już po 6 dniach od momentu spodziewanego zapłodnienia. Jednak najlepiej wykonać je pierwszego dnia po terminie spodziewanej miesiączki. Dokładność testu odpowiada testowi laboratoryjnemu i wynosi 99%.

WAŻNE UWAGI:

Zawsze kontaktuj się z lekarzem przed podjęciem ważnych decyzji medycznych.

Pozostałe po wykonaniu badania składniki testu możesz usunąć do śmietnika z odpadami domowymi.