

Test Veroval, domowy, profilakt. chorób jelit, 1 szt



Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HARTMANN PAUL A.G.
Substancja czynna	-

Opis produktu

Test Veroval, domowy, profilakt. chorób jelit

Szybki test na występowanie krwi utajonej w kale.

W przypadku wykrycia należy skonsultować się z lekarzem w sprawie dalszych środków profilaktycznych.

Test polega na wykrywaniu ludzkiej hemoglobiny (Hb) od wartości granicznej na poziomie 40 ng/ml. Dokładność potwierdzona w badaniach oceny skuteczności wynosi ponad 98%.

Dokładny opis testu znajduje się na odwrocie. Sposób ustalania i interpretacji wyników wymaga dokładnego zapoznania się z instrukcją użytkowania. Przed przystąpieniem do testu należy zrozumieć wszystkie szczegółowe informacje.

Ostrzeżenia i ważne wskazówki:

- Test jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie wolno zażywać żadnych jego składników. Unikać kontaktu skóry i oczu z naczyniem z buforem do rozcieńczania próbek.
- Test należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wystawiać testu na działanie bezpośrednich promieni słonecznych ani mrozu. Nie zamrażać. Przechowywać w suchym miejscu w temp. od 2 °C do 30 °C.
- Produkt można stosować tylko przed upływem nadrukowanego na opakowaniu terminu ważności.
- Niestosowanie się do szczegółowych wytycznych podanych w instrukcji użytkowania może doprowadzić do zafałszowania wyników testu.
- Nie należy korzystać z testu, gdy jego opakowanie jest uszkodzone. Nie należy stosować uszkodzonych składników testu.
- W rzadkich przypadkach można uzyskać wyniki fałszywie ujemne*.
- Wszystkie składniki testu są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w tym teście. Nie wykorzystywać testu ponownie!
- Po otwarciu foliowego woreczka test należy wykorzystać niezwłocznie lub w ciągu godziny.
- Słaby wzrok, daltonizm, a także nieprawidłowe oświetlenie mogą negatywnie wpływać na prawidłową ocenę testu.

- Wszystkie składniki testu można usunąć z odpadami domowymi.
- Nie pobierać próbki kału podczas menstruacji.