

## Test Witamina D \* 1 szt.

Cena: 19,12 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

## Test Witamina D \* 1 szt.

**TEST WITAMINA D** (1 test) domowy, kasetkowy test do oznaczania stężenia witaminy D we krwi; test półilościowy wykrywający 25(OH)D

## WSKAZANIA :

**TEST WITAMINA D** to szybki test przeznaczony do oznaczania poziomu witaminy D – 25(OH)D w próbce krwi pobranej z opuszki palca. **Szybki Wynik:** W ciągu zaledwie 10 minut po pobraniu próbki otrzymasz wynik w 4 zakresach.

- niedobór: poniżej 10 ng/ml

- poziom obniżony: 10-30 ng/ml
- poziom prawidłowy: 30-100 ng/ml
- podwyższony: powyżej 100 ng/ml

## WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

- kontrola suplementacji
- zmęczenie
- obniżona odporność
- nadwaga
- wahania nastrojów
- cukrzyca i choroby metaboliczne

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Zadbaj o swoje zdrowie dzięki innowacyjnemu produktowi **TEST WITAMINA D**. Nasz szybki i precyzyjny test pomoże Ci monitorować poziom witaminy D – kluczowej dla Twojego organizmu. Wykrywaj niedobory **w ciągu zaledwie 10 minut** i dbaj o właściwą suplementację, aby cieszyć się pełnym zdrowiem!

Obniżony poziom witaminy D może być przyczyną różnych stanów chorobowych. Niedobór uznawany jest za częsty problem zdrowotny naszego społeczeństwa, który jest przyczyną wielu poważnych chorób: otyłości, osteoporozy, chorób nowotworowych, układu krążenia, o podłożu autoimmunologicznym, cukrzycy czy depresji oraz problemów związanych z wypadaniem włosów, suchością skóry, łamliwymi paznokciami, a nawet problemami związanym z zajściem w ciążę. **Regularne monitorowanie poziomu witaminy D pozwoli w precyzyjny sposób ustalić dawki preparatów uzupełniających tę witaminę.**

## JAK WYKONAĆ BADANIE?

**Przygotowanie:** rozpocznij od dokładnego oczyszczenia palca, a następnie zdezynfekuj go za pomocą dołączonego gazika.

**Krok 1: Bezbolesne Pobranie Krwi:** nakłuj delikatnie opuszkę palca przy użyciu lancetu, który znajdziesz w zestawie. To szybkie i bezbolesne!

**Krok 2: Pobranie Próbkki Krwi:** wykorzystaj dołączoną pipetę kapilarną, aby pobrać niewielką ilość krwi z palca.

**Krok 3: Nałożenie Krwi:** kropelkę krwi umieść w okienku oznaczonym symbolem S. To pierwszy krok w kierunku otrzymania dokładnego wyniku!

**Krok 4: Dodanie Odczynnika:** do okienka z symbolem B dodaj 2 krople odczynnika, który znajduje się w zestawie. To ważny krok w procesie oznaczania poziomu witaminy D.

**Krok 5: Czekanie i Odczyt:** odczekaj jedynie 10 minut, a następnie spójrz na wynik. Czy Twój poziom witaminy D jest optymalny?

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 saszetka z testem kasetowym oraz pipetą kapilarną
- 1 gazik do dezynfekcji
- 1 sterylny lancet (nakłuwacz) do uzyskania próbki krwi
- 1 pojemnik z zakraplaczem zawierający 1ml odczynnika
- karta wyników
- instrukcja użycia

**Producent:** Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. **Podmiot odpowiedzialny:** DIATHER Petruszewicz Sp. K.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.