

## THC Test do wykryw.narkot.w moczu 1 szt.



Cena: 14,33 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	HYDREX PRZED.TECH.HANDL.
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### THC Test do wykryw.narkot.w moczu 1 szt.

THC Test jest to paskowy test narkotykowy wykrywający marihuanę i haszysz. Po zażyciu marihuany czy haszyszu głównym produktem przemiany materii, która odbywa się w wątrobie, są kanabinoidy zawierające głównie metabolit karboksylowy (THC). THC utrzymuje się w organizmie człowieka na poziomie wykrywalnym przez 5 do 20 dni. THC Strip jest szybkim testem paskowym o czułości 50 ng/ml do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC,) obecnych w moczu po użyciu marihuany lub haszyszu. Wykonanie badania testem THC jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym uzyskuje się w ciągu 5 minut.

**THC może wywołać trwałe uzależnienie psychiczne.** Przy zażywaniu preparatów konopi obserwuje się m.in. następujące objawy:

- wzrost ciśnienia krwi i przyspieszone tętno;
- wysuszenie śluzówek jamy ustnej, czasami ataki kaszlu;
- przekrwienie gałek ocznych, spojówek, niekiedy obrzęk powiek;
- nadmierną potliwość;
- zwiększenie apetytu;
- bóle i zawroty głowy;
- zaburzenia koordynacji ruchowej, uwagi i możliwości uczenia się;
- zaburzenia pamięci;
- ogólnie gorszą sprawność psychofizyczną (wzrost urazowości);
- radość, euforię;

Marihuana i haszysz wyrabiane są z konopi indyjskich (*Cannabis sativa* L.), rosnących w południowo-wschodniej Azji, w rejonie Morza Śródziemnego, w Ameryce Środkowej i Południowej. Można je również hodować w klimacie umiarkowanym. Są to najbardziej rozpowszechnione, a tym samym najczęściej używane narkotyki w Polsce i na świecie. W niektórych krajach preparaty konopi są legalizowane i dopuszczane do oficjalnego obrotu.

#### WAŻNE UWAGI:

Jeśli uzyskałeś wynik dodatni dla któregośkolwiek narkotyku obserwuj osobę, której mocz badałeś. Jeśli wynik dodatni będzie się powtarzał, zgłoś się do odpowiedniej jednostki po fachową pomoc. Jeśli uzyskałeś wyniki ujemne, to nie oznacza, że osoba której mocz

badaleś, nie zażywa narkotyków. Istnieją łatwo dostępne substancje maskujące, które dodane do moczu z narkotykiem, dają wynik fałszywie ujemny. Jeśli upłynął zbyt długi czas od momentu użycia narkotyku, to jego poziom w badanym moczu jest tak niski, że test go nie wykrywa.

Zawsze kontaktuj się z lekarzem przed podjęciem ważnych decyzji medycznych.

Pozostałe po wykonaniu badania składniki testu możesz usunąć do śmietnika z odpadami domowymi.